

INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE

Icaset®

Video de capacitación para colocación de descartable



Notas: Los descartables ICASET® se usan en las bombas de los modelos Icatu Enteral

Botón de Encendido

1. Para que sea posible instalar el descartable ICASET®, el equipo debe estar encendido.



2. Abra la puerta y observe siempre si el corta-flujo automático del equipamiento esta abierto, como se muestra en la siguiente imagen:

Corta-flujo automático abierto.

El descartable se conecta de derecha a izquierda.

3. Inicialmente, posicione el corta-flujo (móvil) de la guía a la distancia adecuada para ser colocado.

Corta-flujo móvil



4. Inserte el corta-flujo descartable en su cavidad respectiva como se muestra en la imagen a continuación:

Corta-flujo

5. Coloque correctamente el descartable en la ranura, instalando los intermedios en sus cavidades correspondientes, con naranja a la derecha y blanco a la izquierda, como se muestra en la imagen a continuación:

El descartable se conecta de derecha a izquierda.



6. Coloque correctamente el tubo del descartable en los sensores de presión y aire, observando la dirección correcta del flujo y manteniendo la alineación correcta entre los puntos de conexión (corta-flujo descartable y sensor de aire).

Sensor de aire
Sensor de presión



7. Antes de cerrar la puerta, verifique que el posicionamiento y alineación del descartable sean correctos, como se muestra en la imagen a continuación:



8. Cierre la puerta.

LA INADECUADA COLOCACIÓN ESTA RELACIONADO CON ALARMAS DE...



- Si se ve registro de este mensaje abra la puerta asegúre la correcta colocación del tramo del descartable indicado.
- Cierre la puerta
- Confirme con la tecla OK

Extracción del descartable.

9. Cierre el regulador de flujo (roller clamp) completamente antes de abrir la puerta:



10. Para extraer el descartable, abra la puerta del equipo. Al realizar esta acción, aparecerá una pantalla de aviso:



Seleccione la opción "SI" y a continuación, el corta-flujo del equipamiento se abrirá automáticamente, posibilitando extraer y cambiar el descartable.

