

INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE

Mongatu

GUÍA RÁPIDA


Escaneá y
mirá el tutorial
YouTube



PASO 01

A. Encienda el equipo pulsando el botón.

Se llevará a cabo una verificación **automática**.
Si aparece una cruz (X) en algún ítem, el
equipo requerirá atención del servicio técnico.

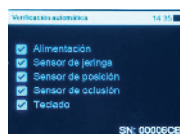


B. Luego, tire del **soporte de la jeringa** hacia usted
hasta hacer tope y sostengalo evitando que vuelva
a su posición.

Inmediatamente gírelo a la derecha en el sentido
de las agujas del reloj.




PASO 02

C. A continuación, de forma simultánea, con la
mano izquierda presione la **palanca naranja**
de seguridad hacia abajo, mientras con su
mano derecha extiende el **empujador de la**
jeringa hasta el final para liberarlo.

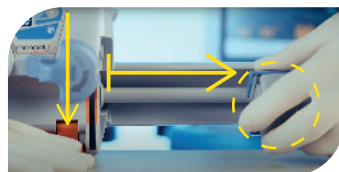


D. Luego, gire la **perilla final** en el sentido
contrario al de las agujas del reloj para abrir
la **abrazadera** y permitir insertar de la **jeringa**.

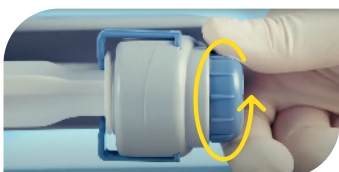


PASO 03

E. A continuación, de forma simultánea, con la
mano derecha, coloque y mantenga firme la
jeringa en la **ranura resaltada en naranja**, con
la **escala numérica** hacia usted.

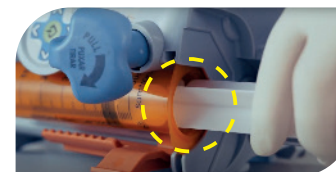


F. luego con su mano izquierda gire el **soporte**
hacia abajo (en sentido contrario a las agujas
del reloj) para fijar la jeringa.

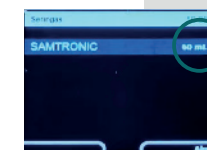

PASO 04

G. Nuevamente con la mano izquierda presione la
palanca naranja de seguridad hacia abajo, y
con su mano derecha ajuste el **empujador de**
la jeringa hacia la izquierda hasta que toque el
émbolo.

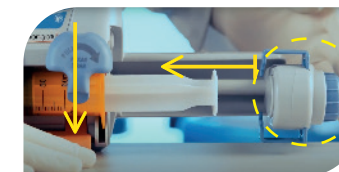

H. Luego, gire la **perilla** en sentido a las agujas
del reloj, para cerrar la **abrazadera** y ajustar el
émbolo.

