

INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE

Milset®

Video de capacitación para colocación de descartable



Notas: Los descartables MILSET® se usan en las bombas de los modelos ST1000 Set

1. Encienda el equipo y aguarde su verificación inicial, asegurándose que todos los puntos digan "OK".

SENS. PUERTA...OK
SENS. GOTAS...OK
SENS. PRESION...OK
SENS. AIRE...OK




2. Abra la puerta y levante el **corta-flujo** en forma manual.

Corta-flujo abierto.


El descartable se conecta de derecha a izquierda.

3. Inicialmente, inserte el encastre dedicado en su cavidad respectiva como se muestra en las imágenes a continuación:

Encastre

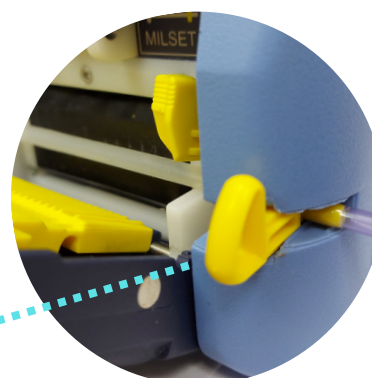

4. Coloque correctamente el descartable en la ranura, instalando los intermedios en sus cavidades correspondientes, con amarillo a la derecha y blanco a la izquierda, como se muestra en la imagen a continuación:

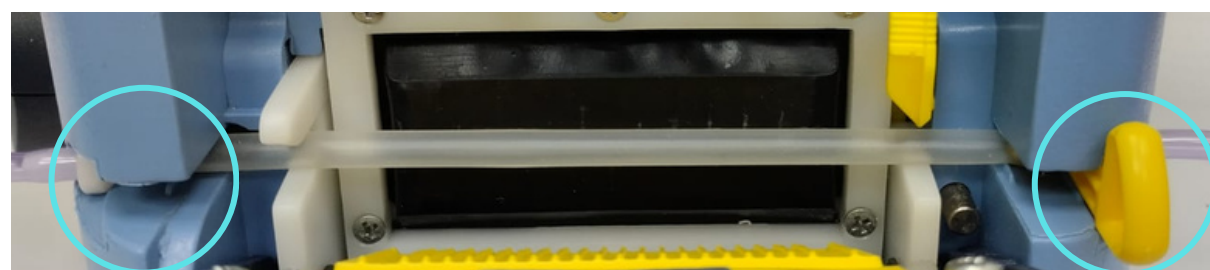

5. Purgar el descartable correctamente (manualmente o utilizando la purga del equipo), retirando todo el aire. Cerrar el regulador de flujo (Roller clamp) nuevamente, de este modo será evitada una situación de flujo libre (en el caso de llenado manual).

Botón de purgar




6. Coloque el descartable en el sensor de aire, tal como se indica en la siguiente imagen:



Luces indicando la inserción incorrecta o falta de descartable en la cavidad del sensor de aire en línea.



Instalación del descartable en el sensor de aire en la línea - Sentido del flujo (de arriba a abajo).

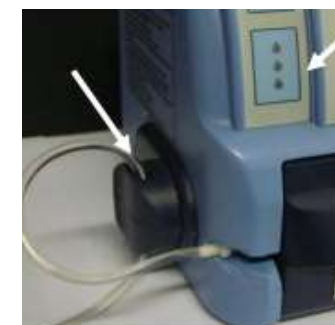

Las luces se apagan después de la instalación adecuada en la cavidad del sensor.

COLOCAR SENSOR DE GOTA



Coloque el sensor de gotas en este espacio/ubicación. (Entre el goteador y el nivel de líquido)

Llenar el reservorio 1/3 de la capacidad



Forma correcta de insertar el sensor de gotas, manteniendo la cámara en posición vertical.



Forma incorrecta de colocar el sensor de gotas en la cámara, no los mantenga inclinados.

LA INADECUADA COLOCACIÓN ESTA RELACIONADO CON ALARMAS DE...

ALARMA DE BOLSA VACIA

ALARMA DE FLUJO LIBRE

EXTRACCIÓN DEL DESCARTABLE

7. Antes de retirar el descartable, cierre el regulador de flujo (roller clamp) completamente.

8. Abra la puerta y levante el corta-flujo, como se muestra en la siguiente imagen y procesada a retirarlo.

Corta-flujo abierto.

