




INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE ST7000

GUÍA RÁPIDA

Escaneá y
mirá el tutorial
YouTube




PASO 01

A. Encienda el equipo pulsando el botón. 
Se llevará a cabo una verificación **automática**.
Si aparece una cruz (X) en algún ítem, el
equipo requerirá atención del servicio técnico.



B. Luego, tire del **sujetador de la jeringa** hacia arriba
hasta hacer tope y sostengalo evitando que vuelva
a su posición.
Inmediatamente gírelo a la derecha en el sentido
de las agujas del reloj.

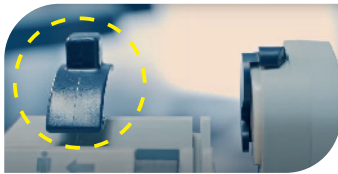

PASO 02

C. A continuación, de forma simultánea, con
la mano izquierda presione el **botón de
desbloqueo** del empujador, y con su mano
derecha extienda el **empujador** de la jeringa
hasta el final para liberarlo.




D. Luego, abra la **tapa de fijación** del **empujador**
para permitir insertar la jeringa.



PASO 03


E. A continuación, de forma simultánea, con la
mano izquierda, coloque el **ala de la
jeringa** en la ranura con la escala numérica
hacia usted.

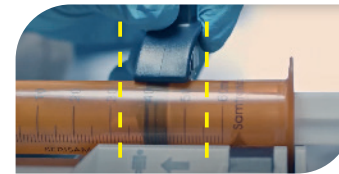

F. Luego con su mano derecha gire el **sujetador de
la jeringa** posicionándolo encima para fijarla.

PASO 04

G. Nuevamente de forma simultánea, con
la mano izquierda presione el **botón de
desbloqueo** del empujador, y con su mano
derecha ajuste el empujador de la jeringa
hacia la izquierda hasta que toque el **émbolo**.

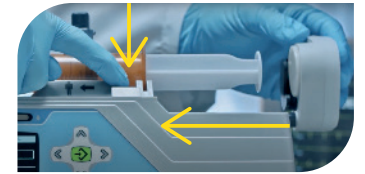

H. Luego, cierre la **tapa de fijación** del **empujador**
hacia arriba para ajustar el **émbolo**.



La bomba reconocerá automáti-
camente el tamaño de la jeringa.