

INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE

Icaset®

Video de capacitación para colocación de descartable



Notas: Los descartables ICASET® se usan en las bombas de los modelos ICATU

1. Para que sea posible instalar el descartable ICASET®, el equipo debe estar encendido.

Botón de Encendido



2. Abra la puerta y observe siempre si el **corta-flujo** automático del equipamiento esta abierto, como se muestra en la siguiente imagen:

Corta-flujo automático abierto.

El descartable se conecta de derecha a izquierda.

3. Inicialmente, posicione el corta-flujo (móvil) de la guía a la distancia adecuada para ser colocado.

Corta-flujo móvil

4. Inserte el corta-flujo descartable en su cavidad respectiva como se muestra en la imagen a continuación:

Corta-flujo

5. Coloque correctamente el descartable en la ranura, instalando los intermedios en sus cavidades correspondientes, con naranja a la derecha y blanco a la izquierda, como se muestra en la imagen a continuación:

El descartable se conecta de derecha a izquierda.



6. Coloque correctamente el tubo del descartable en los sensores de presión y aire, observando la dirección correcta del flujo y manteniendo la alineación correcta entre los puntos de conexión (corta-flujo descartable y sensor de aire).

Sensor de aire

Sensor de presión



7. Antes de cerrar la puerta, verifique que el posicionamiento y alineación del descartable sean correctos, como se muestra en la imagen a continuación:



8. Cierre la puerta.

9. Instale el sensor de gotas en la cámara de goteo como se muestra a continuación:

COLOCAR SENSOR DE GOTA



Coloque el sensor de gotas en este espacio/ubicación.
(Entre el goteador y el nivel de líquido)

Llenar el reservorio 1/3 de la capacidad




Forma correcta de insertar el sensor de gotas, manteniendo la cámara en posición vertical.

Forma incorrecta de colocar el sensor de gotas en la cámara, no los mantenga inclinados.



LA INADECUADA COLOCACIÓN ESTA RELACIONADO CON ALARMAS DE...

DESCARTABLE

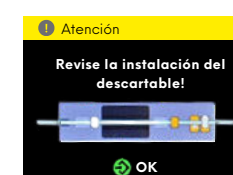

- Si se ve registro de este mensaje abra la puerta asegure la correcta colocación del tramo del descartable indicado.
- Cierre la puerta
- Confirme con la tecla OK

SENSOR DE GOTA



Extracción del descartable.

10. Cierre el regulador de flujo (roller clamp) completamente antes de abrir la puerta:



11. Para extraer el descartable, abra la puerta del equipo. Al realizar esta acción, aparecerá una pantalla de aviso:



Seleccione la opción "SI" y a continuación, el corta-flujo del equipamiento se abrirá automáticamente, posibilitando extraer y cambiar el descartable.

