

Cath ACQUA®

Catéter uretral intermitente
hidrofílico listo para usar

Instrucciones de Uso

Instrucciones de Uso:

1. Lávese bien las manos con agua y jabón o higienícelas con alcohol en gel antes de iniciar el procedimiento.
2. Colóquese con las piernas estiradas, sentado(a) o de pie, de manera que se sienta cómodo(a).
3. Higienice cuidadosamente la zona íntima con agua o una toallita húmeda.



Realice la higiene de la zona íntima de adelante hacia atrás para evitar la contaminación.



Retraiga el prepucio, realice la higiene de la zona, limpie el glande y, por último, el meato uretral.


4. Fije el envase del catéter a una superficie lisa utilizando la parte adhesiva del envase.



5. Abra el envase y retire el catéter sujetándolo por el conector, teniendo cuidado de no dejarlo caer ni contaminarlo.



6. Deslice el grip de inserción desde el conector hacia abajo, desplazándolo entre 10 y 15 cm desde la punta del catéter.

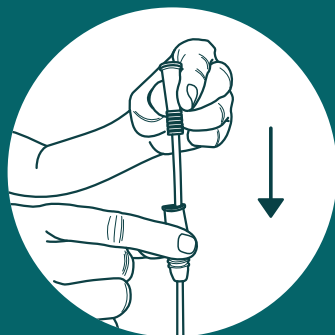

7. Introduzca el catéter.

Exponga la uretra separando los labios con una de las manos. Sostenga el catéter por el grip de inserción e introdúzcalo cuidadosamente, aproximadamente 2 cm por vez, hasta que la orina comience a fluir.






Enderece la uretra levantando el pene con una de las manos, evitando apretarlo, ya que esto puede dificultar la inserción del catéter. Sostenga el catéter por el grip de inserción e introdúzcalo cuidadosamente, aproximadamente 2 cm por vez. Antes de que el catéter alcance la vejiga, puede presentarse una leve resistencia debido al esfínter.

Nota

El catéter puede conectarse a una bolsa de drenaje urinario si no hay un baño cerca.

8. Deje que la orina fluya completamente.

9. Cuando la orina deje de fluir, retire suavemente el catéter aproximadamente 2 cm por vez. Si la orina vuelve a fluir, espere algunos segundos y luego traccione el catéter con cuidado y gradualmente hasta retirarlo por completo. A continuación, deséchelo en un contenedor de residuos.

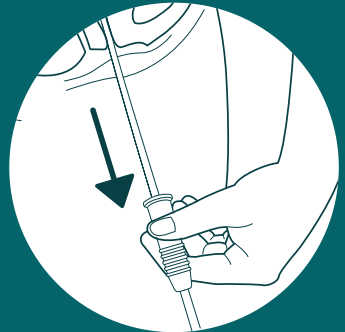

La autocateterización intermitente es un procedimiento de uso frecuente; sin embargo, es fundamental que el paciente busque siempre la orientación de un profesional de la salud y lea atentamente las instrucciones proporcionadas para el uso del catéter.

El usuario debe ser debidamente entrenado para el uso adecuado del CATH ACQUA, que está listo para uso inmediato. El manual del usuario debe leerse atentamente antes de su utilización.

La realización de la autocateterización intermitente con el CATH ACQUA debe realizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud, como médico o enfermero, y de conformidad con las directrices establecidas.

El agua estéril presente en el catéter es segura y no presenta riesgos. Sin embargo, el catéter no debe utilizarse si el envase está abierto, rasgado o ha superado la fecha de vencimiento.

Este producto es de un solo uso. La reutilización, el reprocesamiento, la limpieza, la desinfección o la reesterilización pueden comprometer sus características, representando un riesgo potencial para el usuario.

El cateterismo debe realizarse lo más rápidamente posible después de abrir el envase, y el catéter debe retirarse una vez que la vejiga haya sido completamente vaciada.

SAMTRONIC no se responsabiliza por cualquier daño o pérdida que pueda ocurrir si este producto no se utiliza de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por la empresa.



EFFECTOS ADVERSOS

- Sensación de ardor y/o dolor en la uretra
- Infección del tracto urinario
- Sangrado uretral relacionado con trauma o infección
- Epididimitis, uretritis, estenosis uretral y cálculos en la vejiga

CONTRAINDICACIONES

- Uretritis aguda
- Prostatitis aguda
- Epididimitis aguda
- Pacientes con alergia al PVC
- Pacientes con urolitiasis cálcica

INFORMACIONES GENERALES

CATH ACQUA es un catéter uretral intermitente sin bolsa y posee una superficie hidrofílica estéril activada al entrar en contacto con agua estéril. Este recubrimiento crea una superficie suave y deslizante, haciendo la inserción más fácil y cómoda, y reduciendo el riesgo de lesiones en la uretra y de contaminación.

CATH ACQUA es un catéter listo para usar, fabricado en TPU o PVC libre de DEHP, sin ftalatos, recubierto con PVP reticulado (polivinilpirrolidona), de un solo uso y libre de látex.

INDICACIÓN DE USO

CATH ACQUA se utiliza para el drenaje de la vejiga en individuos con disfunción vesical (dificultad para orinar), como aquellos que sufren lesiones en la médula espinal, enfermedades neurológicas u otras condiciones que afectan el control de la vejiga.

INDICACIÓN DE USO

El CATH ACQUA está listo para su uso. Al abrir el envase, asegúrese de que realizará el cateterismo de inmediato.



Instruções de uso
Instrucciones de uso

Fabricante

Jiangsu JianYu Health Medical Co.,Ltd
Add: NO.88 Longxi Avenue, Zhulin Town,
Jintan District, Changzhou City, Jiangsu,
China.

Desarrollado y fabricado bajo la supervisión de Samtronic.

Titular de la notificación

Samtronic Indústria e Comércio Ltda
CNPJ 58.426.628/0001-33
Rua Venda da Esperança 162
Bairro Socorro São Paulo/SP Brasil
SAC +55 11 22447750
sac@samtronic.com.br
ANVISA 10188530086



 Samtronic